



**EGYEDI
Talpbetét**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Roppanóhabos méretvételhez


A tökéletes, az Ön lábára pontosan illeszkedő egyedi talpbetét vagy személyre szabott lábbeli kulcsa a PONTOS MÉRETVÉTEL.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!




Okostelefonnal leolvasható használati útmutató videó a roppanóhab használatához.


Amennyiben nem rendelkezik okostelefonnal, a **YouTube** (www.youtube.com) keresőjébe írja be:
Batz roppanóhab

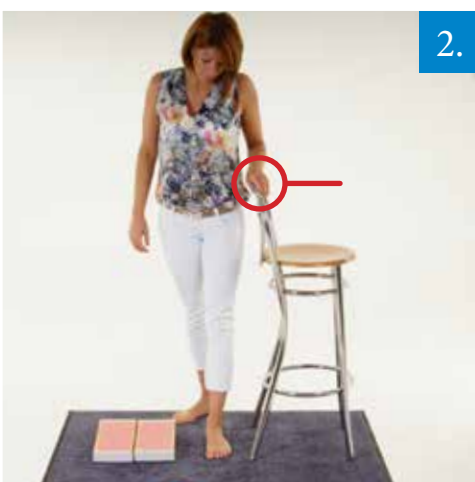

1. Óvatosan nyissa szét a roppanóhab dobozát. Ügyeljen a belül található habfelület épségére, nyitáskor az ujjai a doboz külső felületét érintsék, ne nyomódjanak a habba. **2.** Helyezze a nyitott dobozt a lába elé. Bal lábával lépjen a roppanóhab mellé, közben bal kezével kapaszkodjon meg valaminben (pl. egy szék támlájában), jobb lábával maradjon a roppanóhab mögött.

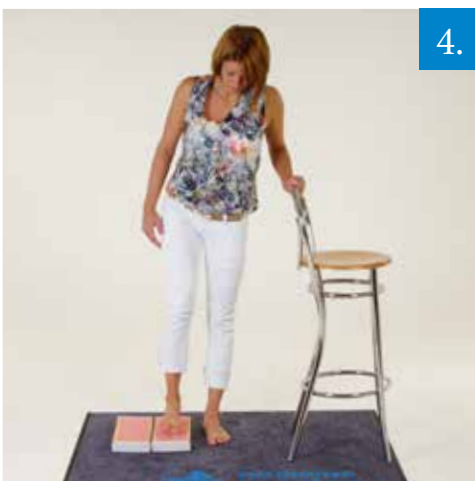


3-4. Helyezze testsúlyát a bal lábára, közben jobb lábát tartsa a levegőben és igazítsa a roppanóhab fölé.

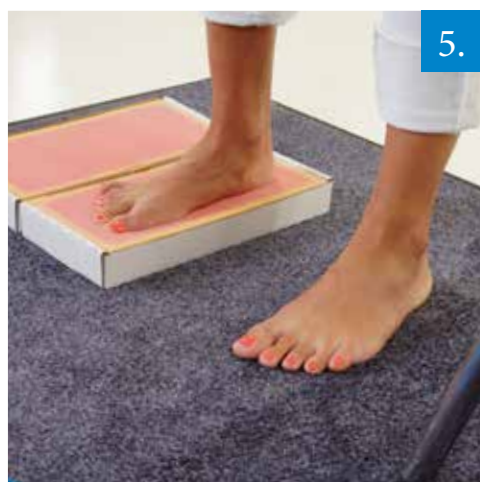

5. Testsúlyát a bal lábán tartva, finoman helyezze a jobb talpát a roppanóhab felszínére, és győződjön meg arról, hogy a talp teljes felülete érintkezik a roppanóhabbal. **6.** Testsúlyát jobb lábára helyezve, egy határozott mozdulattal álljon (roppanjon) bele a habba.



7. Lábujjait egyesével nyomkodja bele a roppanóhabba, ügyelve arra, hogy jobb lábfeje ne mozduljon el, és ujjával ne érintse a roppanóhabot. Ehhez a művelethez lehetőleg kérjen segítséget! **8.** Helyezze vissza a testsúlyát a bal lábára, óvatosan emelje fel a jobb lábát a roppanóhabból.

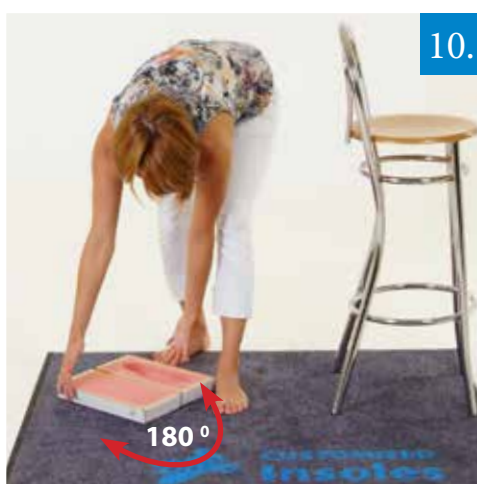

9. Jobb lábával lépjen hátra. **10.** Forgassa el 180 fokkal a roppanóhab dobozát önmaga előtt, majd Ön is forduljon meg.



11-12. Álljon a roppanóhab mögé, kapaszkodjon jobb kézzel a székbe és lépjen jobb lábával stabilan a doboz mellé. Ezáltal a roppanóhab érintetlen felülete a jobb lába mellé kerül. Igazítsa ezúttal a bal lábát a roppanóhab fölé pontosan középre.



13.



14.



15.



16.

13-16. Bal lábával ismételje meg a **3-9.** pontban leírt mozdulatsort.



A mintavétel végeztével óvatosan csukja össze a roppanóhab dobozát, ügyelve arra, hogy ne okozzon sérülést a habfelületen.

Helyezze vissza a roppanóhabot és a kitöltött adatlapot, az eredeti tartódobozba. A dobozt zárja le, rögzítse ragasztószalaggal és küldje vissza címünkre. Köszönjük!

*A személyre szabott talpbetéteket és lábbelikeket gyártja és forgalmazza:
Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.*